


VITA Farbnahme

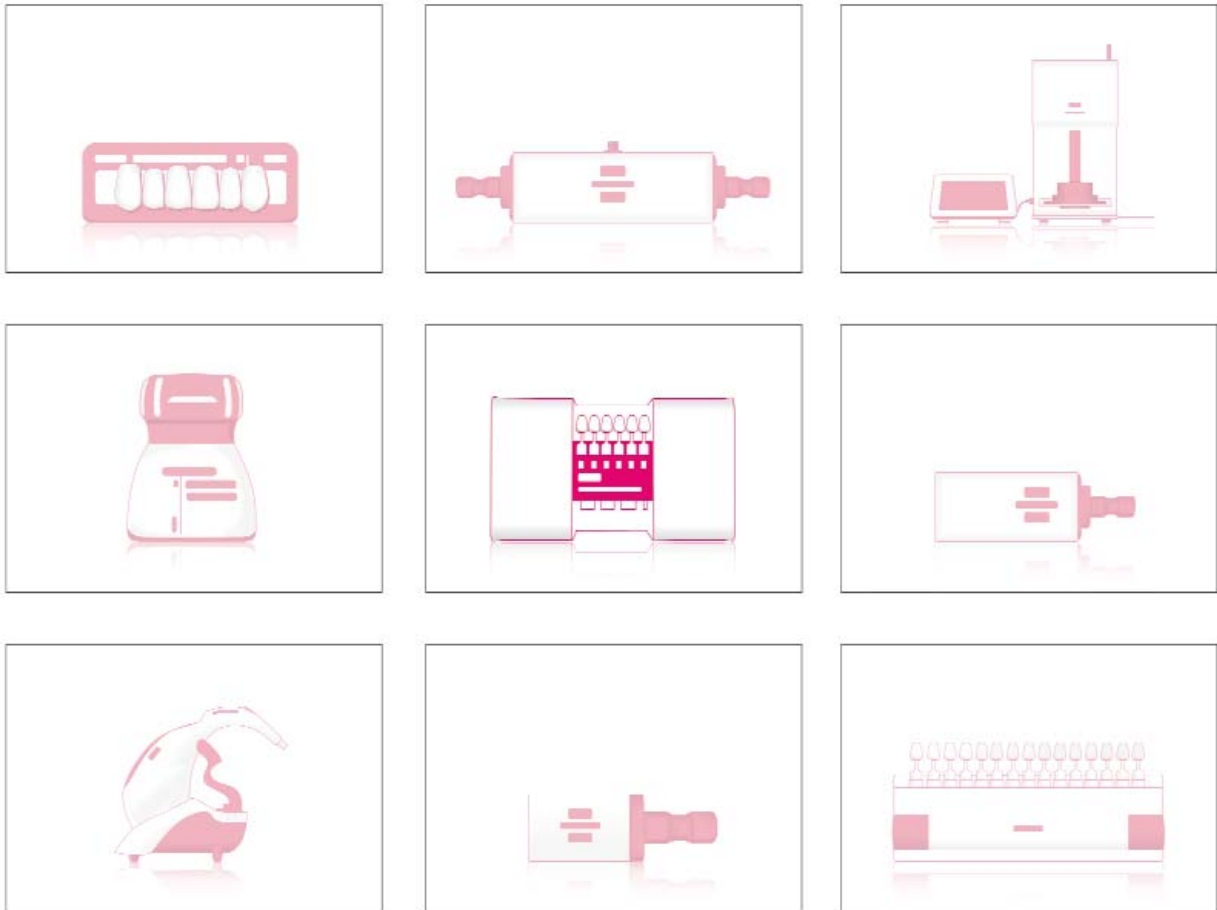

VITA shade, VITA made.

VITA

VITA Linearguide 3D-MASTER

Die neue Leichtigkeit der Farbnahme



Produktbeschreibung

Mit dem VITA Linearguide 3D-MASTER bestimmen Sie zügig und präzise die korrekte Zahnfarbe. Das moderne Design und der systematische Aufbau des VITA Linearguide ermöglichen das schnelle Auffinden der passenden 3D-MASTER Farbe.

Der VITA Linearguide 3D-MASTER erleichtert die Umstellung von herkömmlichen Farbnahmesystemen auf eine präzise Farbbestimmung und Farbkommunikation im VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Der VITA Linearguide 3D-MASTER enthält die gleichen 29 Farbmuster wie der VITA Toothguide 3D-MASTER.

Vorteile

- Klassische lineare Handhabung
- Selbsterklärend, einfache Anwendung
- Sichere, schnelle und präzise Farbbestimmung für zufriedene Kunden
- Modernes Design als Ausdruck von perfekter Ästhetik und Übersichtlichkeit

VITA Linearguide Artikel

VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA Linearguide 3D-MASTER	1 Box	B363

Drucksachen

Titel	Bezeichnung	Best.-Nr.
VITA Linearguide 3D-MASTER	Anleitung	920-02565
VITA Linearguide 3D-MASTER	Produktblatt	1532

VITA Toothguide 3D-MASTER® with BLEACHED SHADE GUIDE



Produktbeschreibung

VITA Toothguide 3D-MASTER®

Mit dem VITA Toothguide 3D-MASTER ist es möglich, alle natürlichen Zahnfarben sicher und systematisch zu bestimmen.

Vorteile

- Zahnfarbbestimmung in 3 Schritten
- eindeutige Zahnfarbbestimmung
- Vergleichsmöglichkeiten: Ja/Nein - Besser/Schlechter-Entscheidung
- mathematisch genau definierte Zahnfarben (mischbar)
- erlernbar

Produktbeschreibung

BLEACHED SHADE GUIDE

Mit dem VITA BLEACHED SHADE GUIDE ist es möglich, Zahnfarben gebleachter Zähne nach dem Prinzip des VITA Toothguides sicher und systematisch zu bestimmen.

VITA Toothguide Artikel

VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA Toothguide 3D-MASTER	1 Stück	B360
VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0	1 Stück	B2600MS

Drucksachen

Titel	Bezeichnung	Best.-Nr.
VITA Toothguide 3D-MASTER	Anleitung	961
VITA Toothguide 3D-MASTER	Kommunikationsschema	914
VITA Toothguide 3D-MASTER mit Bleached Shade Guide	Produktblatt	1419

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®



Produktbeschreibung

Der VITA Bleachedguide 3D-MASTER ist ein Hilfsmittel für den Zahnarzt zur Planung und Kontrolle von Zahnaufhellungsprozessen.

Der Aufbau folgt grundsätzlich der Logik des VITA SYSTEM 3D-MASTER, aufbauend auf den 3 Parametern Helligkeit, Intensität und Farbton. Zu den Helligkeits- und Intensitätsstufen wurden jedoch zusätzlich Zwischenschritte mit weiteren Farbmustern hinzugefügt.

Vorteile

- Zahnfarbtaufhellung kann mit Patient realistisch besprochen werden
- Gleichmäßige, für das menschliche Auge gut unterscheidbare Farbabstände
- Zwischenstufen sind als Farbmuster vorhanden (Helligkeit, Chroma)
- Zahnarzt und Patient können das gewünschte Ergebnis anhand der Farbmuster diskutieren und das erzielte Ergebnis später überprüfen
- Prothetische Versorgungen können - wenn notwendig - mit dem VITA SYSTEM 3D-MASTER angepasst werden.
- Im Recall kann zu gegebener Zeit eine erforderliche Wiederholung der Zahnaufhellung festgestellt werden.

VITA Bleachedguide Artikel

VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA Bleachedguide 3D-MASTER	1 Stück	B361

Drucksachen

Titel	Bezeichnung	Best.-Nr.
VITA Bleachedguide 3D-MASTER	Anleitung	920-26266
VITA Bleachedguide 3D-MASTER	Produktblatt	1432
VITA Bleachedguide 3D-MASTER	Papiermuster	1486

VITA classical A1-D4 Farbskala



Produktbeschreibung

Die VITA classical A1 – D4 Farbskala dient der sicheren Bestimmung der Zahnfarbe.

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 - A4 (Rötlich-bräunlich)

B1 - B4 (Rötlich-gelblich)

C1 - C4 (gräulich)

D2 - D4 (Rötlich-grau)

Farbnahmetipps

- Zahnfarben möglichst unter Tageslicht oder genormten Tageslicht-Leuchten bestimmen und nicht unter gewöhnlicher Raumbelichtung
- Das gesamte Umfeld sollte möglichst farblich dezent sein. Patienten sollten gebeten werden, beeinflussenden Lippenstift oder Kosmetikum zu entfernen. Decken Sie grelle Kleidung mit einem grauen Umhang ab
- Auswahl zügig treffen, immer die erste Entscheidung akzeptieren, da die Augen nach ca. 5 - 7 Sekunden ermüden.

VITA classical A1-D4 Farbskala Artikel

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA classical A1-D4 Farbskala	1 Stück	B0271

VITA classical A1-D4 Farbskala mit VITA Bleached Shades

Das Original wird noch besser: Bleached Shades jetzt auch für VITA classical



Produktbeschreibung

Die Bleached Shades von VITA geben dem Zahnarzt ein praktisches Instrument, jetzt auch im Rahmen der VITA classical Farbskala, Bleachfarben zuverlässig zu bestimmen. Mit den zusätzlichen VITA Bleached Shades sind auch die Zahnfarben gebleachter Zähne innerhalb dieser Originalfarbskala abgebildet.

Die VITA Bleached Shades bestehen aus den Bleachfarben 0M1, 0M2 und 0M3. Sie sind dem VITA SYSTEM 3D-MASTER entnommen und sind auch zum Nachrüsten für die VITA classical A1 - D4 Farbskala sowie für VITAPAN classical verfügbar.

Die VITA Bleached Shades sind auch als Nachrüst-Set für den VITA classical A1-D4, sowie für den VITAPAN classical verfügbar.

Eine detaillierte, genauere Planung und Kontrolle von Zahnaufhellungen kann mit dem eigens dafür geschaffenen VITA Bleachedguide 3D-Master durchgeführt werden.

Farbnahmetipps

- Zahnfarben möglichst unter Tageslicht oder genormten Tageslicht-Leuchten bestimmen und nicht unter gewöhnlicher Raumbelichtung
- Das gesamte Umfeld sollte möglichst farblich dezent sein. Patienten sollten gebeten werden, beeinflussenden Lippenstift oder Kosmetikum zu entfernen. Decken Sie grelle Kleidung mit einem grauen Umhang ab
- Auswahl zügig treffen, immer die erste Entscheidung akzeptieren, da die Augen nach ca. 5 - 7 Sekunden ermüden.

VITA classical A1-D4 Farbskala mit Bleached Shades Artikel

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA classical A1-D4 Farbskala mit VITA Bleached Shades	1 Stück	B027IV1
VITA Bleached Shades (Nachrüst-Set)	2 Adapter, 3 Farbstäbchen	B027BS

VITA Easyshade[®] Advance

Die Evolution geht weiter



Produktbeschreibung

Der VITA Easyshade Advance besticht durch eine neue Software, mit der die Bedienerfreundlichkeit und die Leistungsfähigkeit des Geräts nochmals erheblich gesteigert wurden. Dies ermöglicht eine digitale Zahnfarbnahme, die den Praxis-/ Laboralltag durch noch schnellere und präzisere Ergebnisse erleichtert.

Das optimierte Gerät unterstützt eine erwartungsgemäße und treffsichere Farbnahme von natürlichen Zähnen und Restaurationen völlig unabhängig von Umgebungslicht und Benutzer. Verglichen mit der traditionellen, visuellen Zahnfarbnahme lassen die exakt definierten Daten der Messungen keinen Spielraum für Zahnfarben-, Kommunikations- oder Interpretationsfehler und führen somit zu einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit Ihrer Praxis/Labor.

Durch den neuen VITABLOCS-Modus des VITA Easyshade Advance ist es jetzt möglich mit einer digitalen Farbmessung die VITABLOCS-Farben präzise zu bestimmen, sodass nun auch die Zahnfarbmessung im CAD/CAM Zeitalter angekommen ist.

Der VITA Easyshade Advance ist der nächste Schritt in der Evolution der Zahnfarbmesstechnik für eine schnelle, präzise und objektive Farbmessung.

Vorteile

- Sichere Farbmessung in Sekundenschnelle
- Optimale Bestimmung in VITA classical A1-D4, 3D-Master und VITABLOCS Farben
- Unabhängig von Umgebungslicht und Glanz
- Leichte Bedienbarkeit und große Bewegungsfreiheit
- 100%-iger Infektionsschutz
- Sicher Farbkommunikation und -dokumentation
- Qualitätskontrolle durch die Möglichkeit Restaurationen zu überprüfen
- lange Lebensdauer durch moderne LED Technologie
- Speichermöglichkeit von 30 Farbnahmen

VITA Easyshade[®] Advance Sortiment

VITA Easyshade Advance

Art.-Nr. DEASYAS

Anzahl	Inhalt	Material
1	Stück	Easyshade Advance Ladestation
1	Stück	Easyshade Advance Handstück
40	Stück	Infektionsschutzfolien
1	Stück	CD-Rom (ShadeAssist Software)
1	Stück	Easyshade Advance Verpackung
1	Stück	Netzteil
1	Stück	USB Kabel
1	Stück	Bedienungsanleitung
1	Stück	Kurzanleitung



Drucksachen

Titel	Bezeichnung	Best.-Nr.
VITA Easyshade Advance	Bedienungsanleitung	1506/1
VITA Easyshade Advance	Kurzanleitung	1559M/1
VITA Easyshade Advance	Prospekt	1533

VITA Easyshade[®] Advance Artikel

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
Infektionsschutzfolien	4 x 40 Stück	D39003
Transportkoffer für Easyshade Advance	1 Stück	DEASYASK
VITA ShadeAssist Software	1 Stück CD-Rom	D46900

VITA ShadeAssist

Zahnfarbkommunikationssoftware



Produktbeschreibung

Die bewährte Farbkommunikationssoftware wurde nochmals erheblich verbessert und mit vielen neuen Features ergänzt. Unter anderem hat der Anwender nun die Möglichkeit Patientenbefunde wie auch -berichte direkt per Email zu versenden und diese zu importieren. Des Weiteren können jetzt auch Easyshade-Farbmessungen in Fotobefunden importiert, positioniert und mit Notizen oder Zeichnungen ergänzt werden. Durch eine spezielle Analysefunktion werden nun auf Knopfdruck transluzente Bereiche des Zahns deutlicher aufgezeigt.

Produktbeschreibung

Dies vereinfacht die Kommunikation zwischen Farbnehmer und Restaurationsersteller zusätzlich. Auch die Patientendatenverwaltung wurde weiterentwickelt und unterstützt Praxen oder Labore bei einer übersichtlichen Dokumentation, wie auch Kommunikation ihrer Patientendaten ein weiterer Beitrag zum Qualitätsmanagement. Die neue modifizierte ShadeAssist Software kommuniziert auch mit dem VITA Easyshade Compact. Ab Juli 2011 wird die Software allen VITA Easyshade Advance Geräten beigelegt.

VITA ShadeAssist Artikel

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA ShadeAssist	1 CD-Rom	D46800-04