
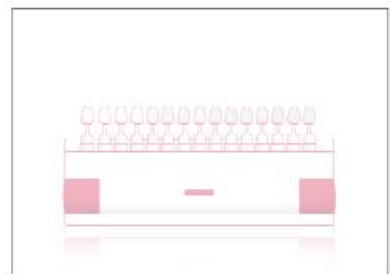
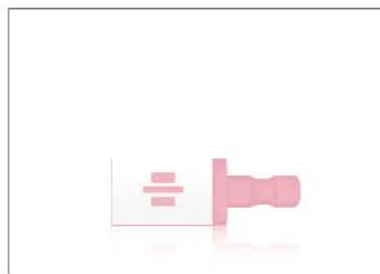
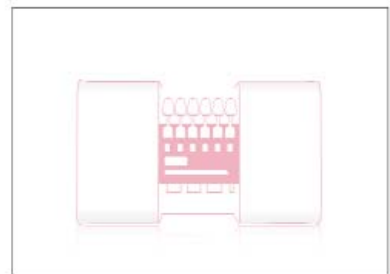
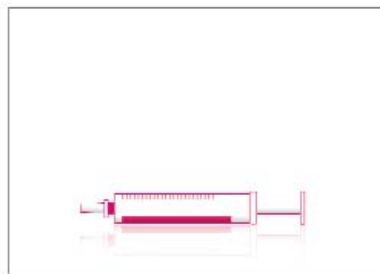
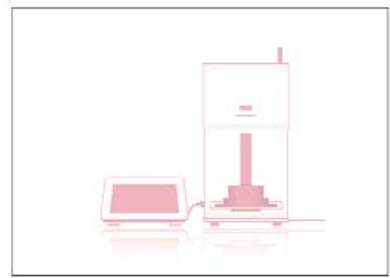


VITA Klinische Produkte

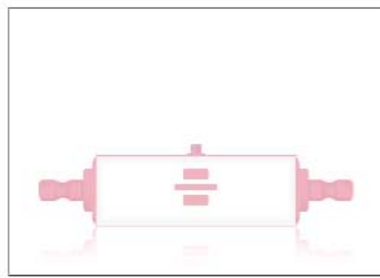

VITA shade, VITA made.

VITA

VITA LUTING SET

Set zur adhäsiven Befestigung von ätzbaren Keramikrestaurationen



Produktbeschreibung

Das VITA LUTING SET beinhaltet alle Materialien, die zur adhäsiven Befestigung von Feldspat- und Glaskeramikrestaurationen sowie Kompositrestaurationen an Zahnschmelz notwendig sind: Schmelz-Ätzel, Dentin-Schmelzadhäsiv, Keramik-Ätzel, Silanhaftvermittler, Befestigungskomposit, Glycerin-Gel und Zubehör.

Drucksachen

VITA LUTING SET Prospekt Nr. 897

VITA LUTING SET Verarbeitungsanleitung Nr. 799

Vorteile

- Komplettsset, "Alles aus einer Hand"
- Sehr übersichtliche, attraktive, platzsparende und logische Präsentation.
- Set ermöglicht step-by-step Vorgehen und vermeidet dadurch fehlerhafte Anwendung.
- Enthält klinisch langjährig bewährte Komponenten, die zum überwiegenden Teil in der für Zahnärzte attraktiven und kostengünstigen Darreichungsform Spritze konfektioniert sind.

VITA LUTING SET Sortimente



VITA LUTING SET

Art.-Nr. FLSET

Anzahl	Inhalt	Material
1		ETCH & BOND KIT
1		CEMENTATION KIT



VITA ETCH & BOND KIT

Art. Nr. FLEBSET

Anzahl	Inhalt	Material
1 Spritze	2,5 ml	ETCHANT GEL (Schmelz-Ätzgel)
1 Flasche	5 ml	A.R.T. BOND, PRIMER A (Dentin / Schmelzadhäsiv)
1 Flasche	5 ml	A.R.T. BOND, PRIMER B (Dentin / Schmelzadhäsiv)
1 Flasche	5 ml	A.R.T. BOND, BOND (Dentin / Schmelzadhäsiv)
2	50 St.	Einwegpinselspitzen
1		weißer Pinselhalter
2		schwarze Pinselhalter *
1	40 St.	Einweg-Tüpfelschälchen
1	20 St.	Einweg-Applikationskanülen, für ETCHANT GEL
		Gebrauchsinformation ETCHANT GEL
		Gebrauchsinformation A.R.T. BOND
		step-by-step Verarbeitunganleitung

* nur im Sortiment erhältlich, kein Einzelverkauf von VITA



VITA CEMENTATION KIT

Art.-Nr. FLCSET

Anzahl	Inhalt	Material
1	3 ml	CERAMICS ETCH (Keramik-Ätzgel)
1	3 ml	VITASIL (Silanhaftvermittler)
1	2,5 ml	DUO CEMENT, Basispaste
1	2,5 ml	DUO CEMENT, Katalysatorpaste
1	3 ml	OXY-PREVENT (Glyzerin-Gel)
1		Mischblock
1	20 St.	Einweg-Zementspatel für DUO CEMENT
1	20 St.	Einweg-Applikationskanülen, rot für CERAMICS ETCH
1	30 St.	Einweg-Applikationskanülen, lavendel für VITASIL
1	10 St.	Einweg-Applikationskanülen, grün für OXY-PREVENT
1	5 St.	Ersatzspritzenverschlüsse, transparent
		Gebrauchsinformation CERAMICS ETCH
		Gebrauchsinformation VITASIL
		Gebrauchsinformation OXY-PREVENT
		Gebrauchsinformation DUO CEMENT
		step-by-step Verarbeitunganleitung

VITA LUTING SET Artikel

VITA LUTING SET

Bezeichnung	Größe	Inhalt	Art.-Nr.
Einweg-Zementspatel für DUO CEMENT	-	20 Stück	FZS
Pinselhalter weiß	-	1 Stück	FCPHW
Einwegpinselspitzen	-	50 Stück	FCPS

* restliche Einzelartikel des VITA LUTING SETS siehe folgende Seiten

VITA DUO CEMENT

Dualhärtendes Feinhybrid-Befestigungskomposit



Produktbeschreibung

Dualhärtendes, röntgenopakes Zweikomponenten-Feinhybrid-Komposit für die dauerhafte Befestigung von ätzbaren Feldspat- und Glaskeramikrestorationen sowie Kompositrestorationen an Zahnschmelze.

Lieferbar in einer Universalfarbe.

Vorteile

VITA DUO CEMENT lässt sich infolge seiner viskosen Konsistenz leicht applizieren, weist eine gute marginale Integrität auf und ist nach dem Aushärten sehr gut polierbar.

VITA DUO CEMENT Sortiment

VITA DUO CEMENT KIT

Art. Nr. FCDCCK

Anzahl	Inhalt	Material
2	2,5 g	Spritze Basispaste
2	2,5 g	Spritze Katalysatorpaste
1	Stück	Mischblock
		Gebrauchsinformation



VITA A.R.T. BOND

Zweistufiges, lichthärtendes Dentin-/Schmelzadhäsiv



Produktbeschreibung

VITA A.R.T. BOND eignet sich zur adhäsiven Befestigung von Keramik- und Kompositrestaurationen mit Befestigungskompositen (z.B. VITA DUO CEMENT) an Dentin und Schmelz mit einer Optimierung der marginalen Randqualität.

Vorteile

Nach Applikation modifiziert der A.R.T. BOND PRIMER den Smear Layer, dringt in die Dentin-Tubuli und verschließt diese. Gleichzeitig wird das Dentin gezielt und schonend demineralisiert. Das Ergebnis ist ein filigranes Retentionsmuster, das vom A.R.T. BOND/ BONDER durchtränkt wird und als hybride Befestigungsbasis für das Befestigungskomposit dient. Daraus resultiert ein dauerhafter Verbund zwischen Restauration und Dentin-/Schmelzfläche und vermeidet postoperative Sensibilitäten. Darüber hinaus optimiert das A.R.T. Bonding System den Pulpenschutz, indem der A.R.T. PRIMER kontinuierlich Fluoridionen an das Dentin abgibt.

VITA A.R.T. BOND Sortimente

VITA A.R.T. BOND SET

Art.-Nr. FCABS

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 ml	PRIMER A
1	5 ml	PRIMER B
1	5 ml	BOND
2	Stück	Pinselhalter
100	Stück	Einwegpinselspitzen
40	Stück	Tüpfelformen
		Gebrauchsinformation



VITA A.R.T. BOND, PRIMER A+B Refill Package

Art.-Nr. FCABP

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 ml	PRIMER A
1	5 ml	PRIMER B
40	Stück	Tüpfelformen
		Gebrauchsinformation



VITA A.R.T. BOND, BOND Refill Package

Art.-Nr. FCABB

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 ml	BOND
40	Stück	Tüpfelformen
		Gebrauchsinformation



VITA ETCHANT GEL

Phosphorsäure-Gel 35%, zum Ätzen von Zahnschmelz



Produktbeschreibung

VITA ETCHANT GEL ist ein Phosphorsäure-Gel (35%) zum Ätzen von Zahnschmelz zur adhäsiven Befestigung von Restaurationen aus Keramik und Komposit an Zahnschmelz. Verwendung auch bei der Total Etch Technik möglich.

Vorteile

- Dunkelblau eingefärbt, dadurch guter Kontrast zur Zahnschmelz.
- Kann präzise und standfest mittels Kanülen appliziert werden.
- Leicht und schnell abspülbar.
- VITA ETCHANT GEL behält seine optimale Konsistenz auch nach vielfachem Gebrauch über viele Monate hinweg bei.

VITA ETCHANT GEL Sortimente

VITA ETCHANT GEL KIT

Art.-Nr. FCEGK

Anzahl	Inhalt	Material
2	2,5 ml	Spritze
20	Stück	Einwegapplikationskanülen
		Gebrauchsinformation



VITA ETCHANT GEL, Zubehör

Art.-Nr. FCEAN

Anzahl	Inhalt	Material
20	Stück	Einwegapplikationskanülen
		Gebrauchsinformation

VITA CERAMICS ETCH

Flusssäure-Gel 5%, zum Ätzen von Keramikrestorationen



Produktbeschreibung

VITA CERAMICS ETCH ist ein Flusssäure-Gel zum Ätzen von Restaurationen aus Feldspat- und Glaskeramik. Durch das dadurch hervorgerufene retentive Ätzmuster kommt es zu einer mikromechanischen Verankerung zwischen Keramik und Befestigungskomposit. Nur für den extraoralen Gebrauch bestimmt.

Vorteile

- In zwei Darreichungsformen erhältlich: Tropferflasche mit 6 ml und Spritze mit 3 ml.
- Roteingefärbt, dadurch guter Kontrast zur Keramik.
- Kann präzise und standfest mittels Kanülen appliziert werden.
- Leicht und schnell abspülbar.

VITA CERAMICS ETCH Sortimente

VITA CERAMICS ETCH

Art.-Nr. FCE3

Anzahl	Inhalt	Material
1	3 ml	Spritze
20	Stück	Einwegapplikationskanülen
		Gebrauchsinformation



VITA CERAMICS ETCH

Art.-Nr. FCE6

Anzahl	Inhalt	Material
1	6 ml	Flasche
		Gebrauchsinformation



VITASIL®

Einkomponenten-Silanhaftvermittler für die Adhäsivtechnik



Produktbeschreibung

VITASIL ist ein Einkomponenten-Silanhaftvermittler und bewirkt einen chemischen Verbund zwischen Keramikrestauration und Befestigungskomposit bei der Adhäsivtechnik.

VITASIL® Sortiment

VITASIL

Art.-Nr. FVS3

Anzahl	Inhalt	Material
1	3 ml	Spritze
30	Stück	Einwegapplikationskanülen
		Gebrauchsinformation



VITA OXY-PREVENT

Glyzerin-Gel zur Vermeidung der Sauerstoffinhibition



Produktbeschreibung

VITA OXY-PREVENT ist ein farbneutrales Glyzerin-Gel zur Vermeidung der Sauerstoffinhibitionsschicht bei der adhäsiven Befestigung von Keramik- und Kompositrestauration mit Kompositen. Auch als Try-In Paste zu verwenden.

Vorteile

- Einfache und standfeste Applikation mittels Kanülen.
- Kann auch als Try-In Paste zur Beurteilung des restaurativen Endergebnisses verwendet werden.

VITA OXY-PREVENT Sortiment

VITA OXY-PREVENT

Art.-Nr. FOP3

Anzahl	Inhalt	Material
1	3 ml	Spritze
10	Stück	Einwegapplikationskanülen
		Gebrauchsinformation



VITA Einmal-Abdrucklöffel

Ober- und Unterkiefer-Abdrucklöffel zur Anfertigung präziser Abdrücke



Produktbeschreibung

Mit den je 4 Größen für bezahnte Ober- und Unterkiefer lassen sich präzise Abdrücke anfertigen.

Zur individuellen Anpassung können die VITA Einmal-Abdrucklöffel beschliffen und nach leichtem Erwärmen über der Gasflamme mit der Kronenschere beschnitten werden.

Vorteile

VITA Einmal-Abdrucklöffel sind aus schlagfestem Polystyrol hergestellt und haben ein erheblich geringeres Gewicht als Metalllöffel. Die Perforation ermöglicht eine zusätzliche Haftung aller Abformmaterialien.

VITA Einmal-Abdrucklöffel sind anpassungsfähig an die jeweiligen Kiefersituationen. Sie sind hygienisch, da der Löffel nur einmal benutzt wird; wirtschaftlich, da Reinigen, Sterilisieren und Trocknen entfallen. Sie sind einfach zu versenden, da der Metallgriff beim Zahnarzt verbleibt.

VITA Einmal-Abdrucklöffel Artikel

Einzelpackungen

Bezeichnung	Größe	Inhalt	Art.-Nr.
Einmal-Abdrucklöffel, OK	B01	25 Stück	FB01
Einmal-Abdrucklöffel, OK	B02	25 Stück	FB02
Einmal-Abdrucklöffel, OK	B03	25 Stück	FB03
Einmal-Abdrucklöffel, UK	BU1	25 Stück	FBU1
Einmal-Abdrucklöffel, UK	BU2	25 Stück	FBU2
Einmal-Abdrucklöffel, UK	BU3	25 Stück	FBU3

Zubehör

Bezeichnung	Größe	Inhalt	Art.-Nr.
Einsteckgriffe	-	10 Stück	FE

Drucksachen

Titel	Bezeichnung	Best.-Nr.
VITA Einmal-Abdrucklöffel	Prospekt	534